

UNICARE INCONTINENCIA/DOLOR

La fuga **urinaria y la incontinencia** son problemas comunes en hombres y mujeres, que afectan su salud a largo plazo. El entrenamiento de los músculos del suelo pélvico es una reconocida forma de prevenir y tratar los síntomas de incontinencia y debilidad del suelo pélvico. El Unicare es un poderoso estimulador muscular utilizado para el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico. Envía una estimulación suave (**similar a los impulsos nerviosos naturales**) directo a los músculos del suelo pélvico a través de una sonda vaginal con electrodos de acero inoxidable. Estas señales provocan que los músculos del suelo pélvico se contraigan. Si usted ha olvidado como contraerlos, presenta problemas de respuesta muscular o simplemente desea recuperar la condición de los músculos del suelo pélvico, el Unicare le ayudará a desarrollar su propio control muscular.



CARACTERÍSTICAS

Unicare es un dispositivo médico diseño para uso en el hogar con la finalidad de tratar los síntomas de la incontinencia urinaria y/o fecal, y de dolor menstrual primario (dismenorrea); y es apropiado su uso para cualquier persona que pueda manejar el dispositivo.

- 1 canal.
- 5 programas preestablecidos.
- 4 programas preestablecidos EMS.
- 1 programas preestablecidos TENS.
- Memoria.

Unicare también puede ayudar a aliviar el dolor menstrual secundario, resultante de la endometriosis, fibromas uterinos o enfermedad inflamatoria pélvica.

INCLUYE




1. Dispositivo Unicare (1 pieza)
2. Estuche portátil (1 pieza)
3. Electrodo cuadrado 5x9cm (2 piezas)
4. Probeta vaginal liberty (1 pieza)
5. Cables L-CPT (2 piezas)
6. Gel (1 piezas)
7. Clip para cinturón (1 piezas)

- 1 año de garantía.
- Registro Invima.

PRESENTACIÓN

- 1 Programa seleccionado.
- 2 Encendido/apagado.
- 3 Bloqueo del teclado.
- 4 Duración del programa.
- 5 Temporizador del tratamiento.
- 6 Intensidad seleccionada (mA).
- 7 Control del programa.
- 8 Subir potencia
- 9 Bajar potencia.

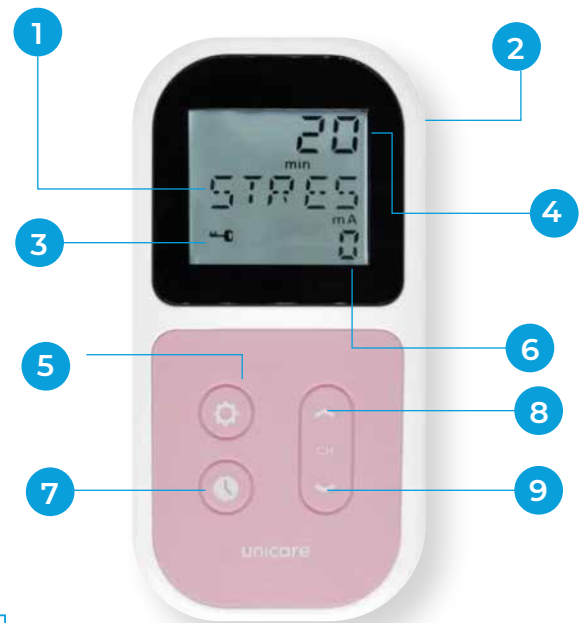

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Forma de onda	Rectangular asimétrica.
Amplitud (> 500 Ohm)	99.0 mA +/- 10%
Intensidad máxima	50V cero a pico a través de 500Ω Voltaje constante sobre 470-1500 Ohm Corriente constante sobre 160-470 Ohm
Toma de corriente	Completamente protegida
Canales	1 canal.
Baterías	Batería de iones de litio incorporada Modelo: YJ 523450-1000mAh Fabricante: YJ Power Group Limited Los índices de audiencia: 1000mAh, 3.7Wh, 3.7V
Peso	103g
Dimensiones	120 x 60 x 20 mm
Clasificación de seguridad	Fuente de energía interna.
Versión de software	R1
Parte Aplicada	Electrodos vaginales y anales. Electrodo para la piel opcionales.

PRECAUCIONES

- Se debe tener precaución si se tiene un trastorno hemorrágico ya que la estimulación puede aumentar el flujo sanguíneo a la zona estimulada.
- al utilizar si sospecha o padece epilepsia ya que la estimulación eléctrica puede afectar el umbral de ataques.
- La inserción del electrodo vaginal o anal en menores deberá ser bajo supervisión clínica.

ADVERTENCIAS

- NO utilice si no puede insertar apropiadamente la sonda vaginal o anal. Si padece un severo prolapso o si experimenta incomodidad al insertar la sonda, consulte a un profesional antes de usar.
- NO utilice mientras conduce u opera maquinaria. Electrodo sueltos, cables dañados, cambios repentinos en la posición de los electrodos pueden causar movimientos involuntarios de los músculos.
- NO utilice para aliviar o cubrir dolor no diagnosticado. Esto puede retrasar el diagnóstico de una condición progresiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROGRAMA	ESTRES	URGE	MIXTO	TONO	DOLOR
HZ	50	10	10/50	35	110
Ancho de pulso	300	200	200/300	25	100
Rampa	1	Constante	Con/1	2	Constante
Trabajo	5		Con/5	3	
Descanso	10		Con/10	6	
Duración	20	Continuo	20	20	Continuo

PROGRAMAS

ESTRES

El programa ESTRES fortalece los músculos del piso pélvico usando estimulación suave.

URGE

La continua estimulación suave calma el músculo de la vejiga (detrusor), reduciendo las contracciones involuntarias.

TONO

La sensación del programa TONE es una mezcla de un fuerte tirón en los músculos y luego una liberación.

MIXTO

Los primeros 10 minutos utiliza el programa URGE para reducir la sensibilidad y en los siguientes 10 minutos, el programa STRES. Tal vez sea necesario subir la intensidad.

MIXTO

Este programa puede ser empleado para aliviar el dolor menstrual. Produce pulsos continuos que provocan una sensación de hormigueo.