

ULTRASONIDO US1000 3RA EDICIÓN (1MHz)

US 1000 tercera edición ofrece una terapia de ultrasonido eficaz al generar ondas ultrasónicas profundas dentro de los tejidos del cuerpo para tratar el dolor, los espasmos musculares y la rigidez de las articulaciones. La unidad portátil viene como un kit completo con estuche de transporte, adaptador de CA, gel de ultrasonido y manual.



CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo de ultrasonido terapéutico que genera calor profundo en la zona afectada.
- El dispositivo debe usarse con gel de ultrasonido para conducir la energía a la piel y, conectado a la corriente eléctrica con el adaptador incluido.
- Tres configuraciones de salida de energía (alto, medio, bajo).
- Viene completo con ultrasonido, adaptador de CA, estuche de transporte, gel de ultrasonido y manual de instrucciones.

INCLUYE



- | |
|--------------------------------------|
| 1. Dispositivo Ultrasonido (1 pieza) |
| 2. Adaptador de corriente (1 pieza) |
| 3. Gel (1 piezas) |
| 4. Manual de uso (1 pieza) |
| 5. Estuche rígido (1 piezas) |

- Registro Invima.
- 6 meses de garantía.

PRESENTACIÓN

- 1 Indicador de intensidad led.
- 2 Botón Encendido/apagado - alto, medio, bajo.
- 3 Cuerpo principal.
- 4 Cabezal de tratamiento.
- 5 Cuerpo principal.
- 6 Asistencia de agarre
- 7 Etiqueta.
- 8 Puerto de carga.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Fuente de alimentación	Adaptador de CA - Entrada de CA de 100-240 voltios (DC 15V)
Tipo de onda	Pulsátil
Frecuencia	1.0 MHz ± 10%
ERA área de tratamiento	6,16 cm² ± 20%
Temporal potencia máx.	4W ± 20%
Modo de salida	Pulso
Intensidad de salida	1.6W / cm² (baja), 2.6W / cm² (medio), 4.6W / cm² (alta)
Ciclo de trabajo	8% (bajo), 14% (medio), 29% (alto)
Ancho de pulso	Bajo: 8% 0,5 mS ± 10% Medio: 14% 1mS ± 10% Alto: 29% 2mS ± 10%
Tasa de repetición	150Hz ± 10%
Tiempo de trabajo	5, 10 y 15 minutos
Material del aplicador	Aluminio
Tipo de haz	Colimado
Tamaño	17.2 cm × 5.4 cm × 4.2 cm
Peso	120 gr

PRECAUCIONES

- NO utilice este dispositivo para síndromes de dolor no diagnosticados hasta que consulte a un médico.
- Pacientes con marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo metálico o electrónico no debe utilizar este equipo sin consultar primero un doctor.
- NO usar este dispositivo en mujeres que esten en embarazo o que tengan el periodo menstrual.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo debe usarse únicamente bajo supervisión continua de un médico o practicante autorizado.
- Nunca lo use en áreas de la piel que carezcan de sensación normal.
- Cuando utilice ultrasonido, mantenga el cabezal de sonido en movimiento mientras manteniendo el contacto con la piel.
- NO sumerja el Ultrasonico Portátil en agua u otro solvente.