

TANQUE DE PARAFINA

SM508 X3 LBS

La **terapia de parafina** es uno de los métodos más efectivos de aplicación de calor para aliviar el dolor provocado por artritis, la rigidez muscular y tratar la inflamación de las articulaciones. La parafina también hidrata, con lo que se obtiene una piel más suave y saludable.



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un tratamiento de cera de parafina que hace la piel suave y tersa, con un efecto hidratante especialmente adecuado para pieles secas, envejecidas o ásperas.

- **Alivio del dolor:** Reduce el dolor muscular y articular asociado a condiciones como la artritis, la tendinitis y las lesiones deportivas.
- **Mejora de la circulación:** El calor de la parafina aumenta la circulación sanguínea, lo que puede ayudar a reducir la inflamación y acelerar la recuperación.
- **Relajación:** La terapia con parafina proporciona una sensación de calma y relajación, reduciendo el estrés y la tensión muscular.
- **Humectación de la piel:** Deja la piel suave, hidratada y protegida.


INCLUYE



1. Par de guantes para manos.
2. Par de guantes de pies.
3. 27 pares de guantes plasticos.
4. 3 lbs parafina lavanda o rose.
5. Rejilla.
6. Manual de uso.

PRESENTACIÓN

- 1 Pantalla digital.
- 2 Tapa protectora.
- 3 Botón disminución de calor.
- 4 Botón encendido/apagado.
- 5 Botón aumento de calor.

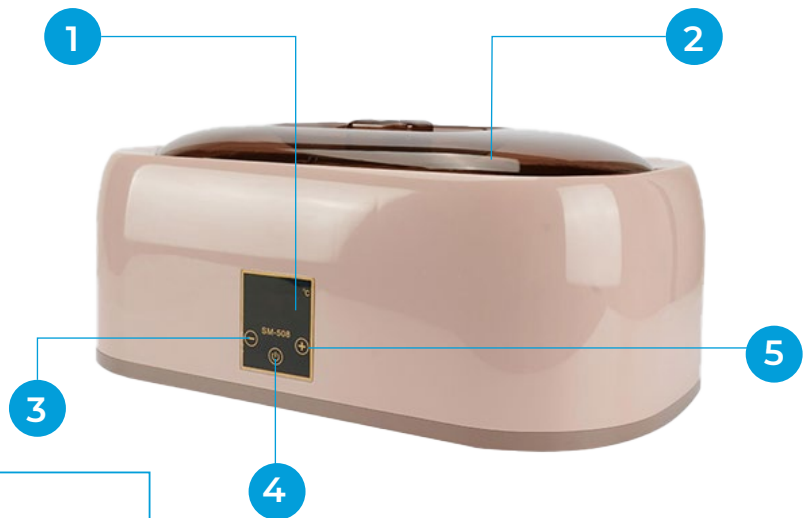

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Marca	ICMTHERAPY
Rango de temperatura	Rango de temperatura: 0 - 100 °C
Voltaje	120v - 60Hz
Peso:	1,20kg (sin parafina)
Tamaño: Altura 14cm, Ancho 36cm, largo 22cm	
La temperatura se puede ajustar en incrementos de 5 °C mediante los botones de control.	

PRECAUCIONES

- No sobrepasar el tiempo de tratamiento recomendado.
- Mantener el equipo desenchufado cuando no esté en uso.
- Limpiar la máquina después de cada uso para evitar acumulaciones de cera.

INSTRUCCIONES DE USO

- Limpiar la parte del cuerpo que se va a tratar antes de usar el dispositivo.
- Colocar la cera en el interior de la máquina, encenderla y ajustar la temperatura deseada.
- Aplicar la cera una vez que haya alcanzado la temperatura adecuada.
- Retirar el exceso de cera con un paño después del tratamiento. Se recomienda el uso de guantes plástico desechables.
- Sumergir la zona a tratar durante 20-30 minutos para promover la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel.
- Apagar el equipo y desenchufarlo tras el uso