

MASAJEADOR DE OJOS INTELIGENTE

El masajeador de ojos inteligente está diseñado para aliviar la fatiga visual, reducir el estrés y brindarte una experiencia de relajación profunda después de largas jornadas frente al computador, el celular o el trabajo diario. Su diseño ergonómico tipo visor se adapta cómodamente al rostro, bloqueando la luz exterior para crear un ambiente de descanso más efectivo, mientras disfrutas de una sensación similar a un masaje profesional.



CARACTERÍSTICAS

- Se recomienda ajustar la tensión al nivel apropiado durante el uso (la tensión se puede ajustar lentamente de acuerdo con la experiencia durante el uso), y usarlo apoyado contra un sofá o silla para un mejor ajuste, una fuerza más uniforme y un mejor efecto y comodidad.
- Se recomienda usarlo 1-2 veces al día durante 10-20 minutos cada vez. Recuerde cerrar los ojos y descansar durante 3-5 minutos después de su uso, y sus ojos estarán más cómodos de esta manera
- El producto se puede usar después de cargarlo.
- Limpie la mascarilla y la cubierta del producto con una toalla húmeda o una bola de algodón sumergida en un 75% de alcohol medicinal.
- Manténgase alejado de la fuente de fuego, los líquidos corrosivos y varios tipos de entornos adversos.
- El dispositivo tiene una superficie de calentamiento. Las personas que no son sensibles al calor deben tener cuidado al usarlo.

INCLUYE



1. Masajeador de ojos inteligente (1 pieza)
2. Cable de carga (1 pieza)
3. Manual de uso (1 pieza)

Tamaño: Altura: 11cm Ancho: 20cm

Peso: 328g

PRESENTACIÓN



Descripción de la operación

Tecla LPower: Presione largamente para encender/apagar el producto, y se escuchará el mensaje de voz "Encender/apagar"; Presione brevemente para cambiar de modo, y se escuchará el mensaje de voz para indicar el modo correspondiente.

2 Tecla de música: Haga doble clic para cambiar a la siguiente música Bluetooth (esta operación no se puede realizar durante el ruido blanco); presione brevemente para ajustar el nivel de volumen 0/1/2/3.

(Volumen apagado - volumen bajo - volumen medio - volumen máximo)

3 Intensidad/Tecla de calentamiento: Presione brevemente para ajustar la intensidad de la presión del airbag, en 0/1/2 nivel (Sin presión/Presión suave/Presión fuerte) En modo de calentamiento. Puede mantener presionados los botones de música y intensidad de presión del aire al mismo tiempo para ajustar la temperatura alta (predeterminada) y la baja temperatura

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Cuatro modos	
Mensaje de voz	
Música incorporada	
Conexión Bluetooth	
Compresión de aire	
Puerto de carga tipo C	
Capacidad de la batería	1200mAh
Potencia nominal:	5W
Voltaje de carga	5V = 1A

Indicador LED

1. Cuando no está conectado a Bluetooth durante el uso: la luz azul parpadea; conéctese a Bluetooth y la luz azul permanece encendida.

2. Baja potencia: la luz roja parpadea y la voz anuncia

"Batería baja" cada dos minutos;

Cargando: la luz roja parpadea lentamente.

Completamente cargado: la luz azul siempre está encendida