

COMPRESAS DE GEL FRÍO-CALOR

ICMTHERAPY - CERVICAL 58X15CM

Esta compresa terapéutica de gel es una solución dual diseñada para el alivio de diversas molestias físicas mediante la aplicación de frío o calor. Es un producto de uso externo que ayuda a tratar una amplia gama de síntomas, desde inflamaciones agudas hasta fatiga muscular.

Diseñado para ayudar a aliviar fiebre, hematomas, hinchazón, espasmos musculares, dolores y molestias, dolor de cabeza, quemaduras de primer grado y fatiga.



CARACTERÍSTICAS


USO EN FRÍO

- Coloque el paquete en el congelador o refrigerador durante al menos 2 horas o hasta alcanzar la temperatura deseada.
- La bolsa alcanzará la temperatura de su congelador; ajuste la configuración si requiere más frío.
- Introduzca siempre la bolsa de gel en su envoltura antes de utilizarla.
- Se recomienda guardarla en el refrigerador para que esté lista para su próximo uso.

USO EN CALOR

- Inicie con la bolsa a temperatura ambiente y envuélvala en un paño húmedo o papel absorbente.
- Colóquela en el centro del plato giratorio del microondas, asegurándose de que no toque los bordes y que funciones como "dorar" estén desactivadas.
- Caliente según los tiempos indicados; si requiere más calor, use intervalos adicionales de 10 segundos.
- Amase la bolsa para distribuir el calor uniformemente y gírela 180 grados antes de volver a calentar.

INCLUYE

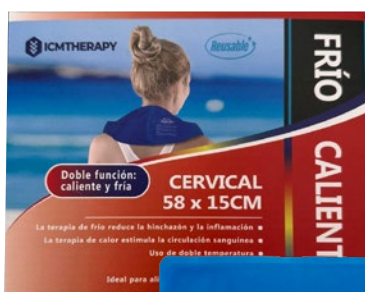

1. Compresa de gel frío-calor
2. manual de uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Tamaño: 58x15cm
2. Color: azul
3. Peso: 919g

COMPRESAS DE GEL FRÍO-CALOR ICM THERAPY - CERVICAL 58X15CM

| Clasificación | Tiempo de calentamiento desde temperatura ambiente | Tiempo de recalentamiento si se requiere más calor | Tiempo máximo total de calentamiento sugerido |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 800 vatios | 50 segundos | 10 segundos | 60 segundos |
| 1000 vatios | 40 segundos | 10 segundos | 50 segundos |
| 1200 vatios | 30 segundos | 10 segundos | 40 segundos |

Advertencias y Precauciones

Uso Externo: Solo para uso externo; no pise las bolsas de gel ya que el peso excesivo causa daños.

Seguridad: No sobrecaliente el producto y verifique siempre la temperatura antes de aplicarlo.

Restricciones: No ingerir el contenido; no usar sobre piel dañada, irritada o heridas abiertas.

Tiempo de Aplicación: No aplicar calor o frío por más de 20 minutos seguidos sin indicación médica.

Condiciones Médicas: No usar calor si padece mala circulación o diabetes.

Mantenimiento: Limpie con un paño húmedo y deje secar; el envase no es apto para lavadora.

Almacenamiento: Guardar sellado a temperatura ambiente (0°C - 30°C), protegido de la luz y humedad para prolongar su vida útil.